

# 智慧感測壓力腿套

## 產品使用說明書

### 目錄

產品敘述及用途 .....	1
警告與注意事項 .....	1
操作方式 .....	2
如何穿戴 .....	2
APP 操作指引 .....	2
電池更換 .....	2
清潔與維護 .....	3
應用範圍 .....	4
型號及規格 .....	4
製造商資訊 .....	4
產品保證 .....	4
常見問題集 .....	5
關於本文件 .....	5

#### ● 產品敘述及用途

本產品為體表肌電感測器，使用電極在小腿區域偵測肌肉放電訊號，並可記錄即時肌電資訊，同時作為運動時的肌肉活動監測使用。

本產品的偵測數據結果僅作為參考，不具有診斷功能。

#### ● 警告與注意事項

##### 警告

1. 禁止使用於易燃物的環境，以避免爆炸性危害的發生。
2. 使用後請擦乾產品，並置於乾燥通風處保存。
3. 如重摔產品將造成電子零件損毀，請小心使用。

4. 本產品的偵測結果僅參考，並不具有診斷的功能。
5. 廢棄之電子裝置產品請勿丟棄於一般垃圾桶中，處置前，應從產品中取出電池，並根據當地法令的規定，與家庭廢棄物分開處理本產品和（或）其電池。

#### 注意事項

1. 使用本產品前，請詳細閱讀原廠使用說明書。
2. 請確認電極與人體緊密貼合，以避免擷取肌電訊號不良。
3. 請避免將本產品置放於高溫處。
4. 使用本產品時，請勿與其他擷取生理訊號之產品同時使用。
5. 使用過程中，若有任何不適現象，請立即停止使用並儘速就醫。
6. 使用前請確認產品電量，如有不足，請先更換電池後再行使用。


## ● 操作方式

### 如何穿戴

1. 將腿套上的兩端電極片處以水沾濕(如下圖 1 所示)
2. 將腿套穿戴於小腿肚，確認電極片位置於小腿腓腸肌處。
3. 將感測器扣上腿套，logo 朝上並確認藍色 LED 燈號是否閃爍，閃爍即代表開啟並等待 BLE 連線，連線後即不再閃爍。

#### EXG Sensor Instructions for Use:

#### EXG SENSOR 使用說明：

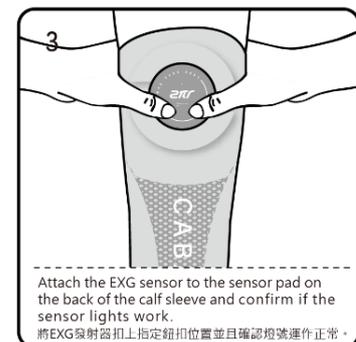

## APP 操作指引

關於 APP 操作說明，請查看以下最新版本：



<http://>

( 放置下載 QR CODE )

## 電池更換

1. 電池位於發射器背面
2. 壓住電池外蓋並逆時針旋轉即可打開
3. 打開電池外蓋即看見電池
4. 等待約 20~30 秒
5. 更換新電池，請使用 CR2032 鋰電池 1 顆，並依正確方向安裝
6. 更換電池後，將電池外蓋放回原位置
7. 最後壓住電池外蓋順時針旋轉並轉緊，防止電池掉出

### Battery Replacement: EXG SENSOR 電池更換：

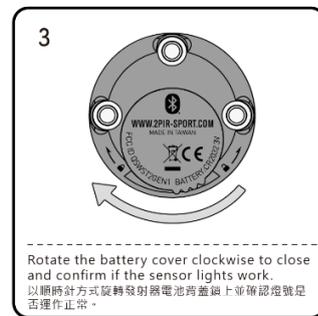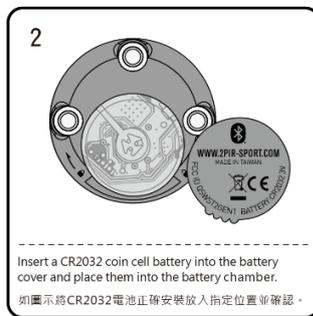

### 警告

- 請勿使用尖銳物品移除電池
- 請勿將電池存放於孩童可及之處，以防止孩童誤食、玩耍，並禁止未成年人使用或操作電池
- 請勿吞食電池，若不慎誤食請立即就醫
- 電池可能含有高氯酸鹽和其他特殊物質

### 注意

請遵循當地法規處理廢棄電池，關於回收的進一步資訊，請洽詢當地的廢棄物管理機構

## 清潔與維護

1. 未使用本產品時，請勿放置於金屬上，以避免兩電極短路。
2. 為了延長電池壽命並防止快速氧化，每次使用後都要從腿套上拆下連接器，後用柔軟的毛巾擦乾。並妥善保管避免電極接觸其他導電材質。
3. 勿放置於高溫處，以避免產品變形。
4. 使用後可使用酒精擦拭乾淨，勿用酸鹼性清潔劑擦拭，以避免電極氧

- 化。
- 長時間不使用時，請將電池移出，以避免電池漏液損害產品。
  - 為避免汗水與鹽分堆積從而影響感測器的準確性，建議每次使用腿套後用清水沖洗。

## 應用範圍

本產品可搭配低週波按摩器使用

(請在有專業人士指導下使用此功能，避免造成意外產生)。

## ● 型號及規格

型號	ST2-EXG7700BL
本體尺寸	38mm × 38mm × 12mm
重量	9.5 公克(不含電池以及周邊配件)
電池	CR2032 鋰聚電池 ( 200 毫安培 )
電池預估壽命	60 小時
顯示方式	LED 燈號即時顯示
量測方式	肌肉放電訊號
量測位置	小腿腓腸肌區域
無線傳輸介面	BLE
防水等級	IPX7
操作溫度	10°C~50°C
儲存溫度	-10°C~60°C
操作濕度	相對溼度 10%到 85%(非凝結狀態)
儲存濕度	相對溼度 5%到 85%(非凝結狀態)

## ● 製造商資訊

製造商名稱:三司達企業股份有限公司

製造商地址:台中市西屯區工業區三十七路 39-1 號

## ● 產品保證

本公司已通過 ISO9001 品質管理認證之要求，所有產品在出廠時，均經過嚴格之品質檢測合格，並負責產品之售後服務工作。若本產品在客戶正常使用情形下發生故障，經鑑定為產品本身之問題，在保證期限內，本公司負免費維修之責任，保固期限為一年。

購買人:  
購買日期:  
產品型號:  
經銷商店章:

 CCAH21LP0220T3

- **常見問題集**

如需常見問題集，請查看以下最新版本:

<http://>

- **關於本文件**

本文件內容未來可能修訂，恕不另行通知。

未經 2PIR 明確書面許可，明確禁止以任何形式或基於任何目的，複製或傳播本文件的全部或部分內容。然而，這不應被視為限制適用著作權法賦予客戶的權利。

2PIR 可能擁有對本文件中，包含的任何專利、專利申請、商標、版權及任何其他無形財產的權利。除非另有規定，否則未授予客戶本文件中包含的任何專利、商標、版權或任何其他無形智慧財產的權利。